

## Was ist perfectpur med forte?

**perfectpur med forte** ist ein Flächen- und Raumdesinfektionsmittel **ohne Alkohol**. Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit bakterizider, levurozider und begrenzt viruzider Wirkung.

## Anwendungsbereiche:

### im gewerblichen Bereich

- **Pflegeheimen;** Toilettenstühlen, alle Oberflächen, Griffen und Stellen mit Handkontakt, ...
- **in Krankentransportern**
- **Studios und Praxen;** Räume bei Kunden- / Patientenwechsel, Wartezimmer und sowie alle Arten von Fußböden,...
- **Desinfektion von :** Klimaanlage, Mixern und Gastronomischen Behältern,...
- **zur Trinkwasseraufbereitung;** jeglicher Art

### im privaten Bereich

- Überall wo eine akute / erhöhte Keim-, Virus- und Pilzbelastung auftritt
- **Desinfektion von Arbeitsflächen und Geräten;** wie Entsafter, Luftbefeuchter oder Staubsauger,...
- **Geruchsminderung**
- **zur Trinkwasseraufbereitung;** im Urlaub ob im Hotel oder im Wohnmobil,...
- **in der häuslichen Pflege;** Flächendesinfektion (Produktgruppe 54 „Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel)

## Anwendung:

### Sprühverfahren:

**perfectpur med forte** zur Desinfektion vor oder nach dem Gebrauch auf Gegenstände und Oberflächen je nach Bedarf aufsprühen und trocknen lassen. **NICHT VERWISCHEN!**

Einwirkzeit: 15 Minuten

### Wischverfahren:

**perfectpur med forte** zur Desinfektion auf ein Tuch aufbringen, vor und/oder nach dem Gebrauch Oberflächen/Gegenstände mit getränktem Tuch desinfizieren.

Einwirkzeit: 5 Minuten

## Zertifizierung:

**perfectpur med forte** ist in der Desinfektionsmittelliste beim IHO\* geführt.  
(\*Industrieverband Hygiene & Oberflächenschutz)



## Verfügbare Größen:

250ml, 1000ml

5Liter, 10Liter, 20Liter - Größere Gebinde auf Anfrage!

## Verträglichkeit:

**perfectpur med forte** enthält keinen Alkohol

und keine:

- Farbstoffe
- Konservierungsstoffe
- Duftstoffe
- Lösungsmittel oder Ähnliches

## Unverträglichkeiten:

Keine bekannt.

## Vorsichtsmaßnahmen:

siehe Sicherheitsdatenblatt (erhältlich unter [www.perfectpur.de](http://www.perfectpur.de))

**Materialverträglichkeit prüfen!**

**Bei unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!**

## Lagerung:

**perfectpur med forte** Produkte bei Zimmertemperatur und dunkel lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Restentleerte Verpackung der Wertstoffsammlung zuführen.

## Haltbarkeit:

Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf dem Behälter.

Unbedingt Lagerungshinweise beachten.

Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen aufbrauchen.

## Wirkstoff:

Aktives Chlor freigesetzt aus Hypochloriger Säure:  $\leq 1,8\text{g}/1000\text{ml}$

BAuA-Nr.: N-92779, Produktart 2,3,4,5

## Alle Produkte:

**perfectpur Air fresh, perfectpur animal, perfectpur flora, perfectpur HD plus Händedesinfektion  
perfectpur home, perfectpur horse, perfectpur med, perfectpur med forte, perfectpur mobile,  
perfectpur skin<sup>plus</sup> & skin GEL<sup>plus</sup>**

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und  
Produktinformationen lesen.**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder an: [info@perfectpur.de](mailto:info@perfectpur.de)